

# TIELLE®


## SILIKON HAFTEND

HYDROPOLYMERVERBAND MIT SILIKON

MIT LIQUA LOCK® TECHNOLOGIE



Acelity™

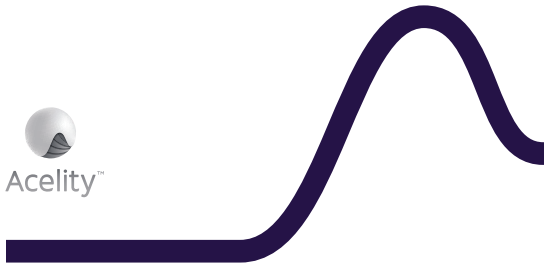

## **DE** Produktbeschreibung

TIELLE® Silicone Border-Hydropolymerverband mit Silikon absorbiert Exsudat, hält bei wenig bis stark exsudierenden Wunden ein feuchtes Wundheilungsmilieu aufrecht und minimiert das Mazerationsrisiko. Der Kombination von Absorptionsvermögen und Dampfdurchlässigkeit kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Der Verband besteht aus einer verklebenden Wundkontaktschicht aus perforiertem weichem Silikonengel, einem saugfähigen Wundkissen aus Hydropolymer Schaum sowie einer stark absorbierenden Vliesschicht und einem hochgradig atmungsaktiven Filmträger. Die weiche Silikon-Wundkontaktschicht von TIELLE® Silicone Border minimiert Schmerz und Trauma beim Verbandwechsel. Der Filmträger ist wasserdicht und wirkt als bakterielle Barriere. Dies trägt zur Vorbeugung einer Wundkontamination bei.

### **Indikationen**

Der TIELLE® Silicone Border-Verband ist für die Behandlung von wenig bis stark exsudierenden Wunden angezeigt.

Der TIELLE® Silicone Border-Verband wird unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal bei folgenden Indikationen verwendet:

- Geschwüre der unteren Extremitäten
  - Venöse Geschwüre
  - Arterielle Geschwüre
  - Geschwüre gemischter Ätiologie
- Diabetische Geschwüre
- Entnahmestellen
- Druckgeschwüre
- Postoperative oder traumatische Wunden

Der TIELLE® Silicone Border-Verband ist auch für die Verwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.

Der TIELLE® Silicone Border-Verband eignet sich auch dann, wenn die Haut, die die Wunde umgibt, anfällig oder empfindlich ist.

### **Bestandteile des Verbands**

Polyurethan, Polyacrylat, Polyester, Nylon und Silikon.

### **Vorsichtsmaßnahmen**

Die Verwendung des TIELLE® Silicone Border-Verbands ist nicht angezeigt bei:

- Verbrennungen dritten Grades.
- Läsionen mit aktiver Vaskulitis

Der TIELLE® Silicone Border-Verband kann verwendet werden, falls sichtbare Anzeichen von Infektion im Wundbereich vorliegen – aber nur, wenn die eigentliche Ursache ordnungsgemäß ärztlich behandelt wird.

**Nicht verwenden, wenn der Patient an einer bekannten Empfindlichkeit gegen irgendwelche Bestandteile des Verbands leidet.**

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

### **Vorbereitung der Stelle**

Die Wunde gemäß Wundmanagementprotokoll vorbereiten.  
Sicherstellen, dass die die Wunde umgebende Haut trocken ist.

### **Verbandapplikation**

1. Einen geeignet großen TIELLE® Silicone Border-Verband auswählen, sodass die saugfähige Insel den Wundrand mindestens 1 cm überlappt.
2. Die Packung durch Abziehen öffnen und den Verband entnehmen.
3. Die Trennpapiere teilweise abziehen, um die Silikon-Wundkontaktschicht des Verbands freizulegen.

4. Die saugfähige Wundauflage mittig über der Wunde positionieren und beim Abziehen der Trennpapiere den Kleberand glatt auf intakte Haut kleben.

TIELLE® Silicone Border hält ein feuchtes Wundheilungsmilieu aufrecht, fördert autolytisches Débridement und ermöglicht die Granulation unter optimalen Bedingungen. Die Läsionsgröße kann dadurch anfänglich zunehmen; dies ist normal und vor der Granulation zu erwarten.

### **Wechseln und Entfernen des Verbands**

Die Häufigkeit des Verbandwechsels wird durch gute Wundbehandlungspraxis bestimmt und hängt vom Zustand der Wunde und der umgebenden Haut ab. Der TIELLE® Silicone Border-Verband kann je nach Exsudatmenge bis zu 7 Tage lang an Ort und Stelle bleiben.

Den TIELLE® Silicone Border-Verband durch Erfassen einer Ecke und vorsichtiges Abziehen entfernen, um jegliches Trauma der intakten Haut zu vermeiden.

**Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.**

**Nicht wiederverwenden (Einmalgebrauch).**

**Nicht erneut sterilisieren.**

**Das Verfallsdatum dieses Produkts ist auf der Verpackung aufgedruckt.**

## **DE** AUF DEM ETIKETT VERWENDETE SYMBOLE



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Nicht wiederverwenden (Einmalgebrauch).



Nicht erneut sterilisieren.



Mit Ethylenoxid sterilisiert.



Gebrauchsinformation beachten.



Vorsicht.



Lagern unter 30°C.



CE-Zeichen und Kennnummer der zuständigen Stelle.



Siehe Gebrauchsinformation für Exsudatniveau.



Katalognummer.



Abbildung: Größe des Verbandes und saugfähige Wundauflage.



Verwendbar bis.



Chargennummer.



Hersteller.



# Acelity™

519415R.b



©2018 Systagenix Wound Management Limited,  
Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, UK

 **Systagenix**

An Acelity Company

**CE**  
**0086**



2018-08