

 Let's Protect®


ACTISORB® PLUS 25

ACTIVATED CHARCOAL DRESSING WITH SILVER

APÓSITO DE CARBÓN ACTIVADO CON PLATA

STERILE R

 Systagenix

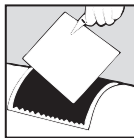

ES Descripción del producto

El Apósito de Carbón Activado con Plata ACTISORB® Plus 25 es un apósito compuesto de carbón activado puro impregnado de plata ($25 \mu\text{g}/\text{cm}^2$). El apósito crea un entorno favorable para la curación eficaz de úlceras mediante la adsorción y fijación de los microorganismos que contaminan e infectan las úlceras.

La impregnación de plata combate los microorganismos en el apósito, con lo que se reduce la colonización bacteriana de la úlcera e inhibe la infección. El apósito ACTISORB® Plus 25 se tolera muy bien y debido a su principio puramente físico de limpieza de la úlcera no hay temor de efectos secundarios o desarrollo de resistencias, como puede suceder cuando se utilizan antibióticos.

Mediante la eliminación de los olores desagradables el apósito ACTISORB® Plus 25 mejora la calidad de vida tanto del paciente como del personal de enfermería.

Indicaciones

El apósito ACTISORB® Plus 25 es adecuado como primer paso terapéutico en el tratamiento de úlceras por presión y varicosas, en las que se produce contaminación bacteriana, infección u olor.

Precauciones

Los médicos/profesionales de la salud deben saber que existen datos muy limitados sobre el uso reiterado y prolongado de los apósitos que contienen plata, especialmente en niños y recién nacidos.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del área de la úlcera

Primero deberá retirarse el tejido seco, necrótico, mediante la desbridación quirúrgica, enzimática o autolítica.

Aplicación

- Antes de la aplicación, el apósito ACTISORB® Plus 25 puede impregnarse con una solución salina o agua estériles.
- Las propiedades adsorbentes del apósito se utilizan más eficazmente cuando el apósito ACTISORB® Plus 25 entra en contacto directo con la úlcera.
- El apósito ACTISORB® Plus 25 puede colocarse sobre la úlcera por ambos lados.
- El apósito ACTISORB® Plus 25 puede colocarse fácilmente dentro de úlceras profundas.
- La superficie exterior de nylon permite retirarlo de la mayor parte de las úlceras sin adherencia ni traumatismo.
- Si se requiere, el apósito ACTISORB® Plus 25 puede colocarse sobre la parte superior de una malla no adherente. En este caso es importante asegurarse que el mecanismo de acción del apósito ACTISORB® Plus 25 no esté afectado por un exceso de pomada o grasa de la malla de contacto.
- Dependiendo del nivel de exudado podría colocarse un segundo apósito, absorbente, sobre el apósito ACTISORB® Plus 25.
- Fijar el apósito de forma apropiada para la indicación.
- Naturalmente, es necesario trabajar de acuerdo con un procedimiento estéril.

Cambio de apósito

El apósito ACTISORB® Plus 25 puede permanecer aplicado en la zona hasta 7 días dependiendo de la cantidad de exudado, mientras que el apósito secundario absorbente se puede cambiar según se requiera. Inicialmente podría ser necesario cambiar el apósito ACTISORB® Plus 25 cada 24 horas.



ADVERTENCIA: El apósito ACTISORB® Plus 25 no debería cortarse, ya que las partículas de carbón activado podrían introducirse en la úlcera y provocar decoloración.

No vuelva a utilizar.

No volver a esterilizar.

No usar si el envase está dañado.

La fecha de caducidad de este producto está impresa en el envase.

ES SIMBOLOS EMPLEADOS EN EL ENVASE



= No usar si el envase está dañado.



= No reutilizar (para un solo uso).



= No volver a esterilizar.



= Esterilizado con radiación.



= Consulte las instrucciones de uso.



= Precaución.

CE **0086** = Marcado CE y Número de identificación del organismo notificado.



= Número de lote.



= Fecha de caducidad.



= Número de catálogo.



= Fabricante.

CE
0086

